

## pour protéger la peau péristomiale des diarrhées induites par la chimiothérapie

Etude de cas soumise par  
Gabrielle Cotton, Stomathérapeute,  
Clinique Renaison, France

### Antécédents

- Femme de 77 ans
- Mai 2022 : Diagnostic d'une tumeur du sigmoïde entraînant un syndrome occlusif
- Création d'une colostomie de décharge
- Pas d'autonomie, impact psychologique négatif de la chirurgie et la dame ne veut pas regarder sa stomie
- Juin 2022 : Début de la chimiothérapie

### Problèmes Rencontrés

- Effets indésirables de la chimiothérapie, dont la diarrhée, qui aura pour conséquence une irritation péristomiale
- Des selles plus liquides associées à une découpe trop large du support entraînent une macération de la peau péristomiale.
- La présence de points de suture sur le contour péristomial et l'utilisation d'un support plat favorisent les fuites.
- Stomie légèrement invaginée affleurant la peau causant des complications pour l'appareillage.
- La dame se plaint de douleurs au niveau de la peau péristomiale causées par l'irritation.

### Conseils de l'infirmière

Ablation des points pour obtenir une surface d'appareillage lisse.

A cause des fuites et de la stomie affleurante, un système eakin **dot**<sup>®</sup> 2-pièce convexe souple a été prescrit ainsi qu'un anneau eakin **freeseal**<sup>®</sup> pour protéger la peau péristomiale. Un joint de pâte eakin **Cohesive**<sup>®</sup> a également été ajouté après la pose du support pour plus de sécurité.

Afin de soutenir au mieux la patiente dans l'acceptation de sa stomie, les rendez-vous ont été rapprochés pour un contrôle plus régulier. L'appareillage est changé tous les 2 jours pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite et que l'état de la peau péristomiale s'améliore.



## “ La peau péristomiale est saine ”

“...la dame est plus sereine et confiante. Elle se sent en sécurité avec sa routine de soins.”

### Résultats obtenus grâce à l'anneau eakin freeseal<sup>®</sup>

**Peau:** La peau péristomiale est saine et il n'y a plus de douleurs ressenties. La cicatrisation des lésions causées par les points de suture continue.

**Gestion de la stomie:** La patiente continue de recevoir un suivi mais la durée de port de l'appareillage a été prolongée à 3 jours pour continuer de surveiller la cicatrisation.

**Invincibles:** La crainte des fuites ou de la douleur a disparu et la dame est plus sereine et confiante. Elle se sent en sécurité avec sa routine de soins.

Utilisation de  
l'anneau eakin  
**freeseal**<sup>®</sup>



Jour 6 -  
Cicatrisation de la  
peau



Utilisation de la  
pâte eakin **Cohesive**<sup>®</sup>



Jour 13 -  
Maintien de la  
protection



Il s'agit d'une étude de cas individuelle et, par conséquent, les affirmations faites correspondent à l'expérience de l'infirmière et n'ont pas été validées par eakin<sup>®</sup>